

La silla de ruedas durará más tiempo si recibe mantenimiento regularmente. Si los usuarios no pueden dar el mantenimiento ellos mismos la silla debe ser llevada al mecánico o al centro de servicio en el cual la silla fue provista.

### Recordatorios generales

- § **Nunca colocar la silla de ruedas cerca del fuego**
- § Ser cuidadoso cuando se fuma cerca de las silla de ruedas
- § No bañarse, entrar al mar o al río en la silla de ruedas
- § No dejar el producto afuera durante una lluvia fuerte o saturarla con agua cuando la limpia
- § Después del contacto con agua salada, el producto primero debe limpiarse con agua dulce y luego secarse completamente
- § Mantener la silla de ruedas limpia incrementara la vida de la silla de ruedas
- § Si la pintura del marco se raya, pinte el área afectada inmediatamente para asegurar que no se corroe
- § **Revise las tuercas y tornillos al menos una vez al mes**



motivation project engineer  
products@motivation.org.uk  
info@motivation.org.uk  
www.motivation.org.uk

Unit 2 Sheene Road  
Bedminster  
Bristol  
BS3 4EG  
s+ 44 (0) 117 9 660 398  
info@motivation.org.uk  
www.motivation.org.uk

# Sillas de rueda moti start y moti go

## Guía de cuido y mantenimiento

## Instrucciones de cuidado y mantenimiento



### cojín y tapicería

- § **Verifique la condición al menos una vez al mes**
- § Busque tela rasgada o costuras y espuma desgastada
- § Regrese la silla al centro de servicio si el usuario tiene problemas o inquietudes con su cojín
- § Mantenga la tapicería de la cubierta apretada en todo momento
- § Limpie el cojín y forro cuando no esté limpio o entre en contacto con la orina.
- § Seque el cojín completamente antes de volver a colocarlo en la silla de ruedas.
- § Nunca exponga el cojín a la luz solar directa, incluso al secarlo

### abductor

- § Verificar el desgaste del abductor
- § Limpie con un paño húmedo regularmente

### ruedas

- § Si las ruedas no funcionan suavemente, es posible que sea necesario cambiar los baleros
- § Verifique que los neumáticos estén duros, al menos una vez al mes
- § Repare cualquier pinchazo de inmediato
- § Verifique que los rayos estén apretados, al menos una vez al mes

### rueda trasera de liberación rápida

- § Verifique que los pernos del seguro de la rueda trasera estén seguros, al menos una vez al mes

### correas


- § Verifique si hay desgaste y vuelva a ajustar según sea necesario

### reposapiés

- § Nunca ponga la mano en el reposapiés durante las transferencias
- § Nunca se pare ni transporte cargas en el reposapiés

### rueda orientable

- § Si no funciona correctamente, es posible que sea necesario cambiar los baleros.

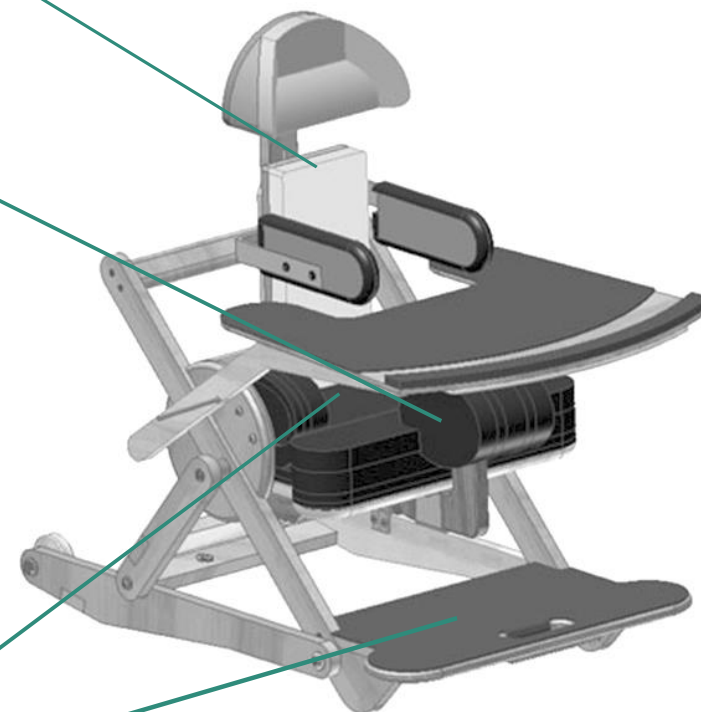

### Transportando la silla de ruedas

- § Remueva la bandeja
- § Desabroche el perno del seguro del asiento / chásis
- § Tire del asiento hacia adelante y levántelo del chásis
- § Desabrochar los tornillos de seguro de la rueda
- § Remueva los baleros

### Transportando la silla de ruedas

- § Remueva la bandeja
- § Remueva el abductor
- § Incline el asiento hacia atrás
- § Levante el producto por el asa en la parte delantera del reposapiés